

Aanvullende veiligheidsrichtlijnen

Houd rekening met het volgende bij het gebruik van Luna Glass.

- Luna Glass is geen vervanging voor een witte stok, een herkennings-stok of een blindengeleidehond. Gebruik het indien nodig in combinatie met andere hulpmiddelen.
- Het apparaat kan het perifere gezichtsveld beperken, waardoor het risico op struikelen, vallen of botsingen kan toenemen. Blijf alert op uw omgeving en draai uw hoofd om rond te kijken, in plaats van alleen uw ogen te gebruiken.
- Wees extra voorzichtig bij het lopen, het gebruik van trappen of het afstappen van stoepranden, aangezien het dieptezicht kan worden beïnvloed, wat het risico op struikelen, vallen of botsingen kan vergroten.
- Als u veel visuele ruis waarneemt, kan het zicht verminderd zijn. Beweeg alleen wanneer u uw omgeving duidelijk kunt waarnemen. Als er te weinig licht is, gebruik dan een zaklamp, zodat het apparaat het licht van de lamp kan versterken.
- Voltooi de configuratie terwijl u stilstaat en oriënteer uzelf vervolgens opnieuw voordat u in beweging komt.
- Het weergegeven beeld komt mogelijk niet op alle afstanden perfect overeen met de werkelijkheid, met name van dichtbij. Dit kan de hand-oogcoördinatie beïnvloeden.
- Gebruik Luna Glass niet in de regen of sneeuw, en dompel het apparaat niet onder in water of gebruik het niet onder water.

Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden

Houd Luna Glass, kabels en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen een verstikkingsgevaar vormen. Kabels kunnen een wurggevaar vormen.

Resterende risico's

In zeldzame gevallen kan het apparaat geen correct beeld meer weergeven of niet meer functioneren. Dit zou kunnen omvatten:

- De camera werkt niet meer (geen beeld)
- Het beeld bevriest of wordt groen
- Het apparaat schakelt onverwacht uit
- Scharnieren raken los of breken
- De uiteinden van de pootjes breken los tijdens het afstellen of tijdens het gebruik

Mocht dit gebeuren, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat, ga naar een veilige plek en neem indien nodig contact op met de klantenservice.

Ondersteuning

Voor hulp of bij veiligheidskwesties:


support@lunaglasses.nl

Ondersteuningspagina: <https://www.seewithluna.com/support>

Veiligheidsupdates: <https://www.seewithluna.com/safety>

Veiligheid en waarschuwingen

Lees dit waarschuwingsblad aandachtig door en raadpleeg de handleiding voordat u Luna Glass gaat gebruiken.

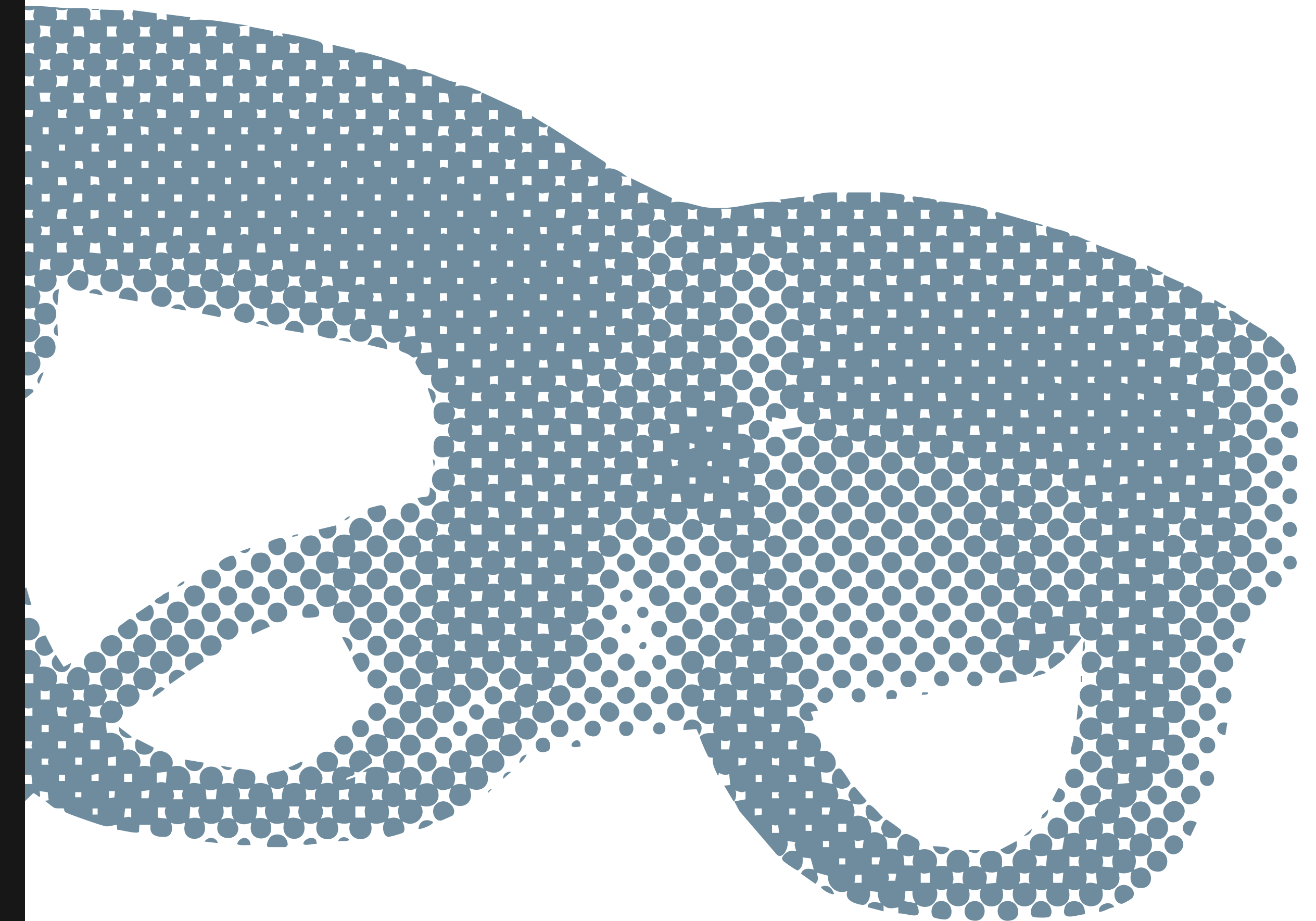

Luna.



 **PROBEER DE POOTJES NIET IN TE KLAPPEN**

 **NIET GEBRUIKEN TIJDENS HET RIJDEN**

Belangrijke veiligheidsinformatie

Luna Glass is bedoeld om mensen te ondersteunen bij dagelijkse activiteiten door beelden bij weinig licht in realtime te verbeteren. Het apparaat biedt een helderder beeld met verbeterde kleuren en contrast, zodat gebruikers objecten, randen en obstakels beter kunnen waarnemen. Luna Glass wordt niet aanbevolen voor mensen met lichtgevoeligheid. Er is geen maximale dagelijkse gebruiksduur vastgesteld. Gebruikers dienen regelmatig pauzes in te lassen en het gebruik van het apparaat te stoppen indien ongemak, vermoeidheid of een verminderde alertheid optreedt. Raadpleeg voor een volledige lijst van alle veiligheidswaarschuwingen de producthandleiding die bij het apparaat is geleverd en die u zorgvuldig dient door te nemen voordat u Luna Glass voor het eerst gebruikt.

- **Luna Glass is een ondersteunend hulpmiddel dat aan vroege gebruikers wordt verstrekt. Het is geen medisch hulpmiddel, dient niet voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van ziekten of aandoeningen, en is niet bedoeld ter vervanging van het natuurlijke gezichtsvermogen, corrigerende lenzen of klinische zorg.**
- **Sommige risico's, storingsmogelijkheden en langetermijneffecten zijn mogelijk nog niet bekend. Door dit apparaat te gebruiken, erkent u dat er onverwacht gedrag of storingen kunnen optreden.**
- **Ga zorgvuldig om met Luna Glass. Als apparaat van de eerste generatie voor vroege gebruikers bevat het kwetsbare optische en elektronische onderdelen die zorgvuldige behandeling vereisen om krassen of schade te voorkomen.**
- **Neem alstublieft de tijd om vertrouwd te raken met het gebruik van Luna Glass in een veilige en vertrouwde omgeving, voordat u erop vertrouwt in openbare of onbekende omgevingen.**

Elektrische veiligheid en opladen

Luna Glass werkt met elektrische onderdelen die gevoelig zijn voor vocht en stof. Houd rekening met het volgende bij het gebruik van Luna Glass:

 **Gebruik altijd de meegeleverde oplaadkabel.**

 **Gebruik het apparaat niet en laad het niet op met natte handen.**

 **Houd poorten en aansluitingen schoon en vrij van stof of vuil.**

 **Gebruik het apparaat niet als er onderdelen beschadigd, los of kapot zijn.**


Stop met het gebruik van het apparaat als u tekenen van storingen opmerkt, zoals een flikkerend scherm, bedieningselementen die niet reageren of abnormale warmteontwikkeling, en neem contact op met de klantenservice.

Veiligheid van de batterij

Luna Glass bevat een verzegelde, oplaadbare lithium-ionbatterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen.

 **Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen boven 50 °C (122 °F) en laat het niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht liggen.**

 **Open, doorboor of verpletter het apparaat of de batterij niet en probeer deze niet zelf te repareren.**

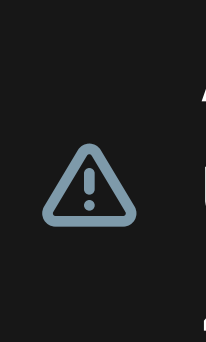 **Als de batterij lekt en de vloeistof in contact komt met uw huid of ogen, spoel deze dan met veel water af en zoek onmiddellijk medische hulp.**

 **Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als het erg heet wordt, rook of een vreemde geur afgeeft, opzwellt of lekt. Plaats het op een brandveilige plek en neem contact op met de klantenservice.**

Lichamelijk ongemak

In enkele zeldzame gevallen kan het gebruik van Luna Glass lichamelijk ongemak veroorzaken.

 **Stop met het gebruik van Luna Glass als u last krijgt van roodheid, zwelling, jeuk of huiduitslag. Ga pas weer verder met het gebruik als de symptomen verdwenen zijn. Raadpleeg een zorgverlener als de symptomen aanhouden.**

 **Zorg ervoor dat de bril goed past en geen overmatige druk uitoefent.**

 **Houd de contactoppervlakken schoon en droog. Het apparaat kan tijdens normaal gebruik warm aanvoelen. Als het ongewoon heet wordt, schakel het dan uit en neem contact op met de klantenservice. Het apparaat schakelt automatisch uit bij temperaturen boven 65 °C / 149 °F.**

Mogelijke bijwerkingen zijn onder meer:

 **Vermoeidheid of overbelasting van de ogen**

 **Bewegingsziekte**

 **Fouten in dieptewaarneming of ruimtelijk bewustzijn**

 **Misselijkheid**

Veilig gebruik tijdens activiteiten

Gebruik Luna Glass zowel binnen als buiten alleen wanneer dit veilig is. Gebruik Luna Glass nooit in situaties waarin een storing van het apparaat ernstig letsel kan veroorzaken, zoals:

 **Het besturen of bedienen van een voertuig.**

 **Het bedienen van machines of elektrisch gereedschap.**

 **Activiteiten die een hoge mate van coördinatie of volledige aandacht vereisen, waaronder hardlopen, fietsen, sporten, koken, snijden met scherpe voorwerpen zoals messen en scharen, of het hanteren van elektrisch gereedschap.**

 **Lopen of van locatie veranderen terwijl u de modus voor weinig licht gebruikt of terwijl u het apparaat configureert.**