

Lisäturvallisuusohjeita

Pidä seuraavat ohjeet mielessä käyttäessäsi Luna Glass -laseja.

- Luna Glass ei korvaa valkoista keppiä, tunnistuskeppiä eikä opaskoiraa. Käytä sitä tarvittaessa yhdessä muiden liikkumisen apuvälineiden kanssa.
- Lasit voivat rajoittaa ääreisnäköä, mikä voi lisätä kompastumis-, kaatumis- ja törmäysriskiä. Pysy tietoisena ympäristöstäsi ja käännä päätäsi havainnoidaksesi ympäristöäsi, älä pelkästään silmiäsi liikuttamalla.
- Ole erityisen varovainen kävellessäsi, liikkuessasi portaissa tai astuessasi alas reunakiveltä, sillä syvyyshahmotus voi heikentyä, mikä voi lisätä kompastumis-, kaatumis- tai törmäysriskiä.
- Jos näet voimakasta kuvan kohinaa (staattista häiriötä), näkyvyys voi heikentyä. Liiku vain, kun pystyt havaitsemaan ympäristösi selkeästi. Jos valaistus on liian heikko, käytä taskulamppua, jotta lasit voivat vahvistaa käytettävissä olevaa valoa
- Tee kaikki asetukset paikallasi seisten ja suuntaudu sen jälkeen uudelleen ympäristöösi ennen liikkeelle lähtöä.
- Näytetty kuva ei välttämättä vastaa täydellisesti todellista ympäristöä kaikilla etäisyyksillä, erityisesti lähietäisyydellä. Tämä voi heikentää silmän ja käden koordinaatiota.
- Älä käytä Luna Glass -laseja sateessa tai lumisateessa. Älä upota laseja veteen äläkä käytä niitä veden alla.

Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

Pidä Luna Glass -lasit, johdot ja lisävarusteet poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Johdot voivat aiheuttaa kuristumisvaaran.

Jäännösriskit

Harvinaisissa tapauksissa lasit voivat lakata näyttämästä oikeaa kuvaa tai lakata toimimasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

- Kamera lakkaa toimimasta (kuvaa ei näy)
- Kuva jäätyy tai muuttuu vihreäksi
- Lasit sammuvat odottamatta
- Sangat löystyvät tai rikkoutuvat
- Sanganpääät irtoavat säädön tai käytön aikana

Jos näin tapahtuu, lopeta Luna Glass -lasien käyttö välittömästi, siirry turvalliseen paikkaan ja ota tarvittaessa yhteyttä asiakastukeen.

Tuki

Jos tarvitset apua tai haluat ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä huolenaiheesta, ota yhteyttä:


support@lunaglasses.nl

Tukisivu: <https://www.seewithluna.com/support>

Turvallisuuspäivitykset: <https://www.seewithluna.com/safety>

Turvallisuus ja varoitukset

Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ja tutustu käyttöoppaaseen ennen Luna Glass -lasien käyttöä.

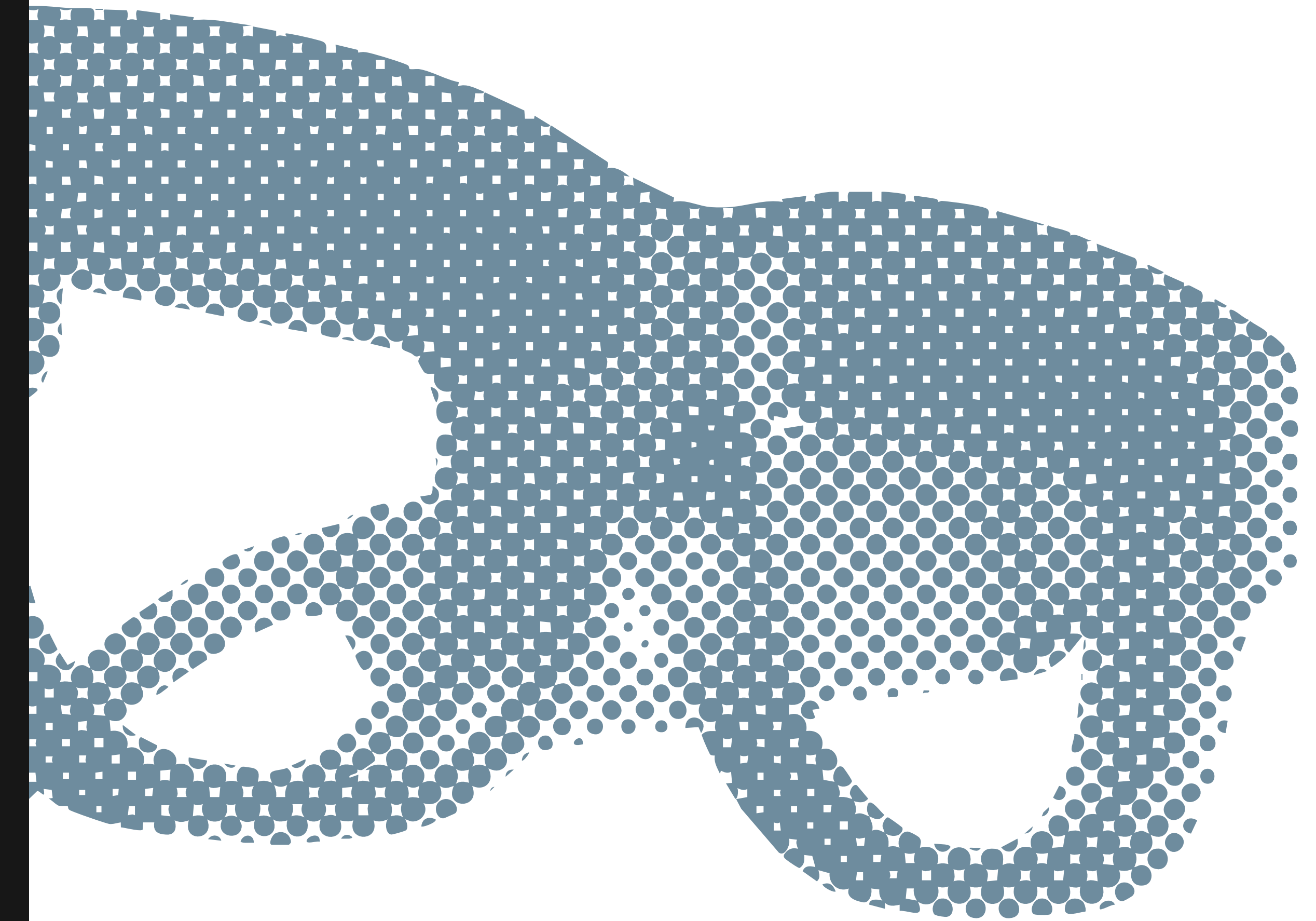

Luna.



 **ÄLÄ YRITÄ TAITTAA SANKOJA**

 **ÄLÄ KÄYTÄ AJONEUVOA AJAESSASI**

Tärkeitä turvallisuustietoja

Luna Glass -lasit on tarkoitettu tukemaan henkilöitä, jotka haluavat parantaa näköään hämärissä olosuhteissa päivittäisissä toiminnoissa vahvistamalla hämärässä näkyvää näkymää reaaliaikaisesti. Lasit tuottavat kirkkaamman kuvan, jossa värit ja kontrasti ovat paremmat, mikä auttaa käyttäjää havaitsemaan esineitä, reunoja ja esteitä paremmin. Luna Glass -laseja ei suositella henkilöille, joilla on valoherkkyyttä. Päivittäiselle käytölle ei ole määritetty enimmäisaikaa. Käyttäjän tulee pitää säännöllisesti taukoja ja lopettaa lasien käyttö, jos käyttäjä kokee epämukavuutta, väsymystä tai ympäristön havainnoinnin heikkenemistä. Kaikki turvallisuusvaroitukset löytyvät laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. Lue käyttöopas huolellisesti ennen Luna Glass -lasien ensimmäistä käyttökertaa.

- **Luna Glass -lasit ovat varhaisille käyttäjille tarkoitettu apuväline. Ne eivät ole lääkinnällinen laite eivätkä ne diagnosoi, hoida, paranna tai ehkäise mitään sairautta tai terveydentilaa. Niitä ei myöskään ole tarkoitettu korvaamaan luonnollista näköä, silmälaseja tai muuta näönkorjausta eikä terveydenhuollon ammattilaisen antamaa hoitoa.**
- **Kaikkia riskejä, vikatilanteita ja pitkäaikaisvaikutuksia ei välttämättä vielä tunneta. Käyttämällä näitä laseja hyväksyt, että niiden toiminnassa voi ilmetä odottamatonta toimintaa tai toimintahäiriöitä.**
- **Käsittele Luna Glass -laseja huolellisesti. Kyseessä on ensimmäisen sukupolven varhaisille käyttäjille tarkoitettu laite, joka sisältää herkkiä optisia ja elektronisia komponentteja. Niitä on käsiteltävä varoen, jotta ne eivät naarmuunnu tai vaurioidu.**
- **Totuttele Luna Glass -lasien käyttöön turvallisessa ja tutussa ympäristössä, ennen kuin alat käyttää niitä julkisissa tai tuntemattomissa ympäristöissä.**

Sähköturvallisuus ja lataaminen

Luna Glass -lasit sisältävät sähköisiä komponentteja, jotka ovat herkkiä kosteudelle ja pölylle. Pidä seuraavat ohjeet mielessä käyttäessäsi Luna Glass -laseja:

 **Käytä aina mukana toimitettua latauskaapelia.**

 **Älä käytä tai käsittele laseja märin käsin.**

 **Pidä liitännät ja liittimet puhtaina sekä vapaina pölystä ja muista epäpuhtauksista.**

 **Älä käytä laseja, jos jokin niiden osa on vaurioitunut, löystynyt tai rikkoutunut.**

Lopeta lasien käyttö, jos havaitset toimintahäiriön merkkejä, kuten näytön välkkymistä, hallintalaitteiden reagoimattomuutta tai epätavallista lämpenemistä, ja ota yhteyttä asiakastukeen.

Akun turvallisuus

Luna Glass -lasit sisältävät suljetun, ladattavan litiumioniakun, jota käyttäjä ei voi vaihtaa.

 **Älä altista laseja yli 50 °C (122 °F) lämpötilalle äläkä jätä niitä lämmönlähteiden läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon.**

 **Älä avaa, lävistä tai murskaa laseja tai niiden akkua äläkä yritä huoltaa niitä itse.**

 **Jos akku vuotaa ja akkunestettä joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.**

Lopeta lasien käyttö välittömästi, jos ne kuumenevat voimakkaasti, niistä tulee savua tai epätavallista hajua, ne turpoavat tai niistä vuotaa akkunestettä. Siirrä ne paloturvalliseen paikkaan ja ota yhteyttä asiakastukeen.

Käyttöön liittyvä epämukavuus

Harvinaisissa tapauksissa Luna Glass -lasien käyttö voi aiheuttaa epämukavuutta.

Lopeta Luna Glass -lasien käyttö, jos sinulle ilmaantuu punoitusta, turvotusta, kutinaa tai ihottumaa. Aloita käyttö uudelleen vasta, kun oireet ovat hävinneet. Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

 **Varmista, että lasit istuvat hyvin eivätkä aiheuta liiallista painetta.**

 **Pidä ihoa vasten tulevat pinnat puhtaina ja kuivina.**

Laite voi tuntua lämpimältä normaalin käytön aikana. Jos se kuumenee poikkeuksellisen paljon, sammuta se ja ota yhteyttä asiakastukeen. Laite sammuu automaattisesti, jos sen lämpötila ylittää 65 °C (149 °F).

Mahdollisia haittavaikutuksia voivat olla:

 **Silmien rasittuminen tai väsyminen**

 **Liikepahoinvointi**

 **Syvyvyshahmotuksen tai tilanhahmotuksen häiriöt**

 **Pahoinvointi**

Turvallinen käyttö eri tilanteissa

Käytä Luna Glass -laseja sisällä ja ulkona vain silloin, kun se voidaan tehdä turvallisesti. Älä koskaan käytä Luna Glass -laseja tilanteissa, joissa lasien toimintahäiriö voi aiheuttaa vakavaa vaaraa, kuten:

 **Ajoneuvon ajaminen tai muun kulkuneuvon käyttäminen**

 **Koneiden tai sähkötyökalujen käyttäminen**

Toiminnot, jotka edellyttävät tarkkaa koordinaatiota tai jakamatonta huomiota, kuten juokseminen, pyöräily, urheilu, ruoanlaitto, leikkaaminen terävillä työkaluilla, kuten veitsillä tai saksilla, tai sähkökäyttöisten työvälineiden käyttö.

Käveleminen tai paikasta toiseen siirtyminen

 **hämäränäkötilaa käytettäessä tai laitteen asetuksia määritettäessä.**