

Consignes de sécurité complémentaires

Veuillez respecter les consignes suivantes lorsque vous utilisez Luna Glass.

- Luna Glass ne remplace ni une canne blanche, ni une canne de signalisation, ni un chien-guide. Utilisez-le en complément d'autres aides techniques lorsque cela est nécessaire.
- L'appareil peut réduire votre champ de vision périphérique, ce qui peut accroître le risque de trébuchements, de chutes ou de collisions. Restez attentif à ce qui vous entoure et prenez l'habitude de regarder autour de vous en tournant la tête, plutôt qu'en bougeant uniquement les yeux.
- Faites preuve d'une vigilance accrue lorsque vous marchez, empruntez des escaliers ou descendez d'un trottoir, car votre perception des distances peut être altérée, augmentant ainsi le risque de trébuchements, de chutes ou de collisions.
- Si l'image présente un important effet de neige (parasites visuels), votre visibilité peut être réduite. Ne vous déplacez que lorsque vous pouvez clairement distinguer votre environnement. Si la luminosité est insuffisante, utilisez une lampe de poche afin de fournir une source lumineuse que l'appareil pourra amplifier.
- Effectuez l'ensemble de la configuration en restant immobile, puis reprenez vos repères visuels avant de vous déplacer.
- L'image affichée peut ne pas correspondre parfaitement au monde réel à toutes les distances, en particulier à courte portée. Cela peut affecter la coordination entre la vision et les mouvements.
- N'utilisez pas Luna Glass sous la pluie ou la neige. Ne l'immergez pas et ne l'utilisez pas sous l'eau.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques

Gardez Luna Glass, ses câbles et ses accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Les câbles peuvent présenter un risque de strangulation.

Risques résiduels

Dans de rares cas, l'appareil peut ne plus afficher une image correcte ou cesser de fonctionner, notamment dans les situations suivantes :

- La caméra cesse de fonctionner (aucune image affichée)
- L'image se fige ou devient verte
- L'appareil s'éteint de manière inattendue
- Les charnières se desserrent ou se cassent
- Les embouts de branche se détachent pendant le réglage ou l'utilisation

Si l'un de ces problèmes survient, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil, mettez-vous en sécurité et contactez l'assistance si nécessaire.

Assistance


Pour toute demande d'assistance ou question relative à la sécurité : support@lunaglasses.nl

Page d'assistance : <https://www.seewithluna.com/support>

Mises à jour de sécurité : <https://www.seewithluna.com/safety>

Sécurité et avertissements

Veuillez lire attentivement cette fiche d'avertissement et consulter le manuel d'utilisation avant d'utiliser Luna Glass.

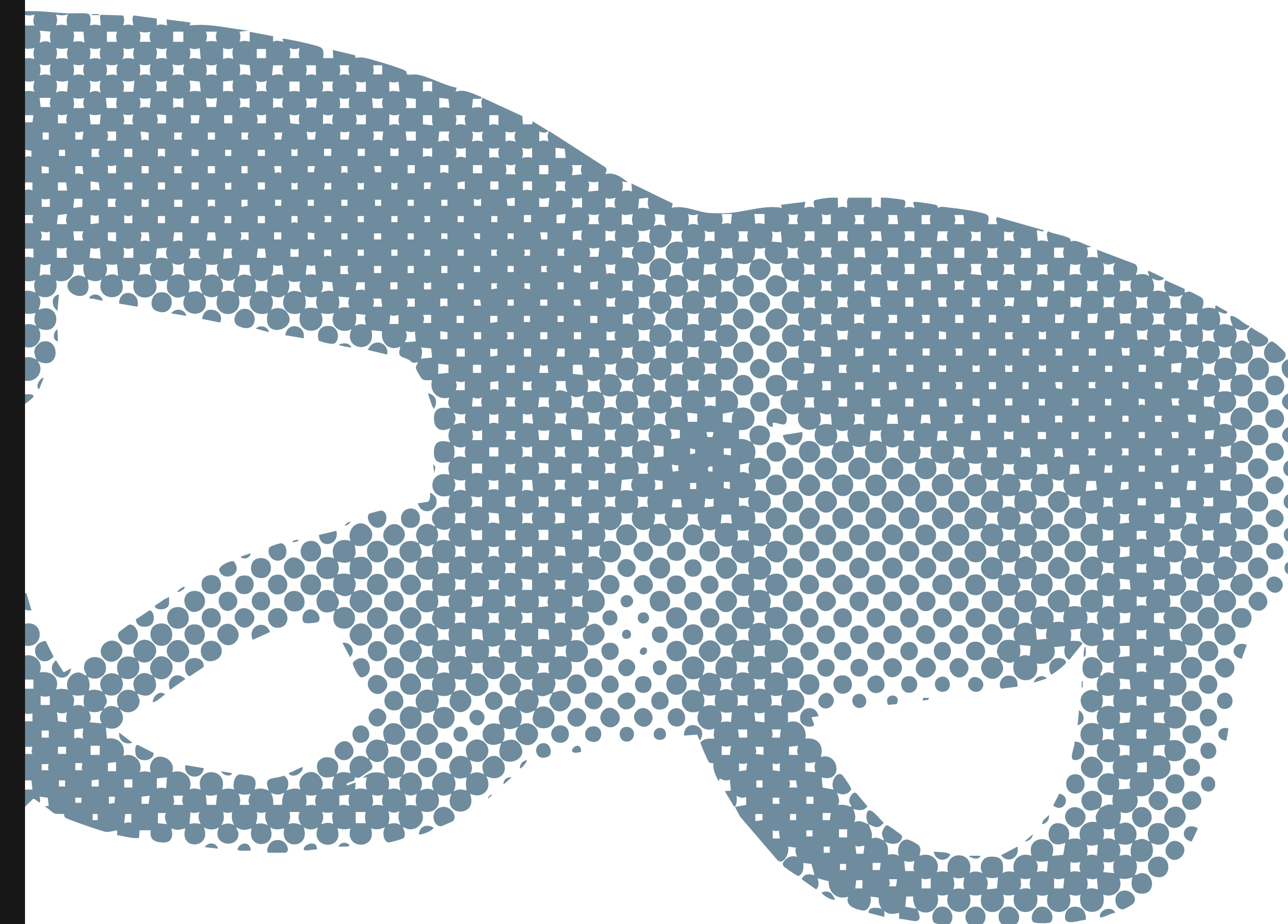

Luna.



 **N'ESSAYEZ PAS DE REPLIER LES BRANCHES**

 **NE PAS UTILISER PENDANT LA CONDUITE**

Informations importantes relatives à la sécurité

Luna Glass est conçu pour aider les personnes souhaitant améliorer leur vision dans des environnements faiblement éclairés au cours de leurs activités quotidiennes, en améliorant les scènes à faible luminosité en temps réel. L'appareil fournit une image plus lumineuse, avec des couleurs et des contrastes renforcés, afin de faciliter la détection des objets, des contours et des obstacles. Luna Glass n'est pas recommandé aux personnes présentant une sensibilité à la lumière. Aucune durée maximale d'utilisation quotidienne n'a été définie. Il est recommandé de faire des pauses régulières et d'interrompre l'utilisation de l'appareil en cas d'inconfort, de fatigue ou de diminution de la perception de l'environnement. Pour consulter l'ensemble des avertissements de sécurité, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation fourni avec l'appareil et le lire attentivement avant la première utilisation de Luna Glass.

- **Luna Glass est un dispositif d'assistance fourni aux utilisateurs précurseurs. Il ne s'agit pas d'un dispositif médical. Il n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou une affection, ni à remplacer la vision naturelle, des verres correcteurs ou un suivi médical.**
- **Certains risques, modes de défaillance et effets à long terme ne sont pas encore entièrement connus. En utilisant cet appareil, vous reconnaissez que des comportements inattendus ou des dysfonctionnements peuvent survenir.**
- **Manipulez Luna Glass avec précaution. En tant que dispositif de première génération destiné aux utilisateurs précurseurs, il intègre des composants optiques et électroniques délicats qui nécessitent une manipulation soigneuse afin d'éviter les rayures ou tout autre dommage.**
- **Prenez le temps de vous familiariser avec l'utilisation de Luna Glass dans un environnement sûr et familier avant de l'utiliser dans des lieux publics ou des environnements inconnus.**

Sécurité électrique et recharge

Luna Glass intègre des composants électroniques sensibles à l'humidité et à la poussière. Veuillez respecter les consignes suivantes lors de son utilisation :

 **Utilisez toujours le câble de recharge fourni.**

 **N'utilisez pas et ne rechargez pas l'appareil avec les mains mouillées.**

 **Veillez à ce que les ports et les connecteurs restent propres et exempts de poussière ou de débris.**

 **N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses pièces est endommagée, desserrée ou cassée.**

 **Cessez d'utiliser l'appareil si vous constatez des signes de dysfonctionnement, tels qu'un affichage qui scintille, des commandes qui ne répondent plus ou un échauffement anormal, et contactez l'assistance.**

Sécurité de la batterie

Luna Glass contient une batterie lithium-ion rechargeable scellée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.

 **N'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 50 °C et ne le laissez pas à proximité d'une source de chaleur ou en plein soleil.**

 **N'ouvrez pas, ne percez pas et n'écrasez pas l'appareil ou la batterie. N'essayez pas non plus de les réparer ou de les démonter.**

 **En cas de fuite de la batterie, si le liquide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin.**

 **Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil s'il devient très chaud, dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle, gonfle ou présente une fuite. Placez-le dans un endroit sûr à l'écart de tout risque d'incendie et contactez l'assistance.**

Inconfort personnel

Dans de rares cas, l'utilisation de Luna Glass peut provoquer un inconfort.

 **Cessez d'utiliser Luna Glass si vous ressentez des rougeurs, des gonflements, des démangeaisons ou si une éruption cutanée apparaît. Reprenez son utilisation uniquement lorsque les symptômes ont disparu. Si les symptômes persistent, consultez un professionnel de santé.**

 **Assurez-vous que les lunettes sont correctement ajustées et qu'elles n'exercent pas de pression excessive.**

 **Veillez à maintenir les surfaces en contact avec la peau propres et sèches.**

 **Il est normal que l'appareil chauffe légèrement pendant son utilisation. S'il devient anormalement chaud, éteignez-le et contactez l'assistance. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque sa température dépasse 65 °C.**

Les effets indésirables potentiels peuvent inclure :

 **Fatigue ou tension oculaire**

 **Mal des transports**

 **Altération de la perception des distances ou de la perception spatiale**

 **Nausées**

Utilisation en toute sécurité lors des activités

Utilisez Luna Glass à l'intérieur comme à l'extérieur uniquement lorsque les conditions permettent une utilisation en toute sécurité. N'utilisez jamais Luna Glass dans des situations où un dysfonctionnement de l'appareil pourrait entraîner des blessures graves, notamment dans les cas suivants :

 **Conduite ou utilisation de tout type de véhicule.**

 **Utilisation de machines ou d'outils électriques.**

 **Activités nécessitant un haut niveau de coordination ou une attention constante, notamment la course à pied, le cyclisme, la pratique d'un sport, la cuisine, l'utilisation d'outils tranchants tels que des couteaux ou des ciseaux, ou encore la manipulation d'équipements motorisés.**

 **Déplacement à pied ou changement de position lors de l'utilisation du mode faible luminosité ou pendant la configuration de l'appareil.**