

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Verwendung von Luna Glass.

- **Luna Glass ist kein Ersatz für einen Langstock, einen Signalstock oder einen Blindenführhund. Verwenden Sie Luna Glass bei Bedarf zusammen mit anderen Hilfsmitteln.**
- **Das Gerät kann das periphere Sehvermögen einschränken, wodurch sich das Risiko von Stolpern, Stürzen oder Zusammenstößen erhöhen kann. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und orientieren Sie sich durch Drehen des Kopfes, nicht ausschließlich durch Augenbewegungen.**
- **Seien Sie besonders vorsichtig beim Gehen, Treppensteigen oder beim Überwinden von Bordsteinkanten, da das räumliche Sehen beeinträchtigt sein kann. Dadurch kann sich das Risiko von Stolpern, Stürzen oder Zusammenstößen erhöhen.**
- **Wenn Sie starkes Bildrauschen (statische Störungen) wahrnehmen, kann die Sicht eingeschränkt sein. Bewegen Sie sich nur, wenn Sie Ihre Umgebung klar erkennen können. Falls zu wenig Licht vorhanden ist, verwenden Sie eine Taschenlampe, damit das Gerät das vorhandene Licht verstärken kann.**
- **Nehmen Sie die Konfiguration nur vor, wenn Sie sich nicht bewegen, und orientieren Sie sich anschließend erneut in Ihrer Umgebung, bevor Sie sich weiterbewegen.**
- **Das angezeigte Bild stimmt möglicherweise nicht in allen Entfernungen vollständig mit der realen Umgebung überein, insbesondere im Nahbereich. Dies kann die Hand-Auge-Koordination beeinträchtigen.**
- **Verwenden Sie Luna Glass nicht bei Regen oder Schnee. Tauchen Sie das Gerät nicht ein und verwenden Sie es nicht unter Wasser.**

Von Kindern und Haustieren fernhalten

Bewahren Sie Luna Glass, Kabel und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Kabel können eine Strangulationsgefahr darstellen.

Restrisiken

In seltenen Fällen kann das Gerät ein fehlerhaftes Bild anzeigen oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Dies kann beispielsweise folgende Ursachen haben:

- **Die Kamera funktioniert nicht mehr (kein Bild)**
- **Das Bild friert ein oder wird grün dargestellt**
- **Das Gerät schaltet sich unerwartet aus**
- **Die Scharniere lockern sich oder brechen**
- **Die Bügelenden lösen sich während der Anpassung oder Nutzung.**

Wenn dies geschieht, stellen Sie die Nutzung des Geräts sofort ein, begeben Sie sich an einen sicheren Ort und wenden Sie sich bei Bedarf an den Support.

Support

Bei Fragen oder Sicherheitsbedenken:


support@lunaglasses.nl

Support-Seite: <https://www.seewithluna.com/support>

Sicherheitsupdates: <https://www.seewithluna.com/safety>

Sicherheitshinweise und Warnungen

Bitte lesen Sie dieses Warnblatt sorgfältig durch und lesen Sie vor der Verwendung von Luna Glass auch die Bedienungsanleitung.

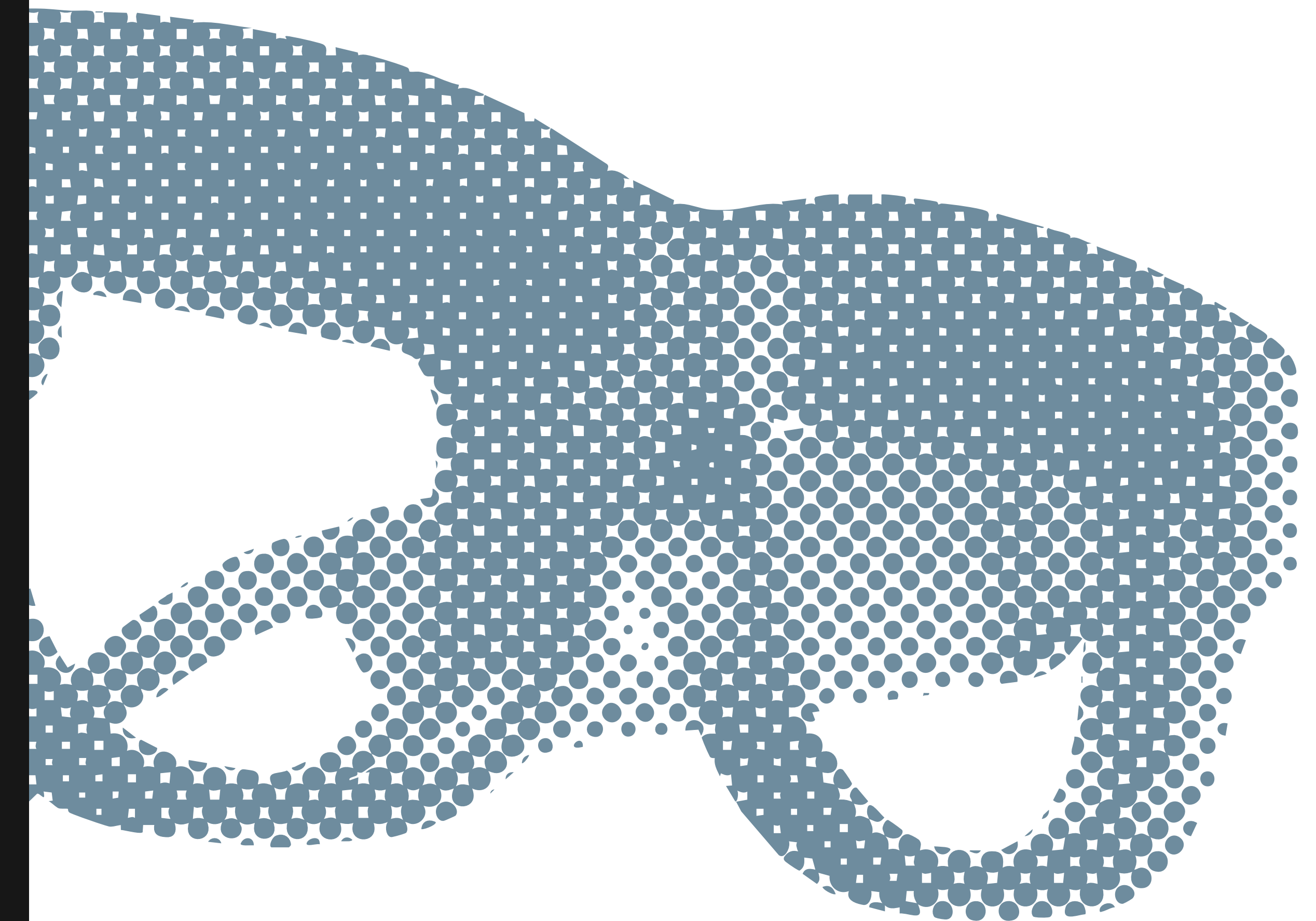

Luna.



 **VERSUCHEN SIE NICHT, DIE BRILLENBÜGEL ZU KNICKEN**

 **NICHT WÄHREND DER FAHRT VERWENDEN**

Wichtige Sicherheitshinweise

Luna Glass wurde entwickelt, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen während alltäglicher Aktivitäten zu verbessern, indem Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen aufgehellt dargestellt werden. Es erzeugt ein helleres Bild mit verbesserten Farben und höherem Kontrast, damit Nutzer Objekte, Kanten und Hindernisse besser erkennen können. Luna Glass wird nicht für Personen mit Lichtempfindlichkeit empfohlen. Es wurde keine maximale tägliche Nutzungsdauer festgelegt. Nutzer sollten regelmäßige Pausen einlegen und die Verwendung des Geräts beenden, wenn Beschwerden, Ermüdungserscheinungen oder eine verminderte Wahrnehmung der Umgebung auftreten. Eine vollständige Liste aller Sicherheitshinweise und Warnungen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Gerät beiliegt und vor der ersten Verwendung von Luna Glass sorgfältig gelesen werden sollte.

- **Luna Glass ist ein Hilfsmittel, das den ersten Anwendern bereitgestellt wird. Es handelt sich nicht um ein Medizinprodukt. Luna Glass dient nicht der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen und ist nicht dazu bestimmt, das natürliche Sehvermögen, Sehhilfen oder eine medizinische Behandlung zu ersetzen.**
- **Einige Risiken, Fehlfunktionen und langfristige Auswirkungen sind möglicherweise noch nicht bekannt. Durch die Verwendung dieses Geräts erkennen Sie an, dass unerwartetes Verhalten oder Fehlfunktionen auftreten können.**
- **Bitte behandeln Sie Luna Glass mit Sorgfalt. Als Gerät der ersten Generation, das von den ersten Anwendern genutzt wird, enthält es empfindliche optische und elektronische Komponenten, die sorgfältig behandelt werden müssen, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.**
- **Bitte nehmen Sie sich Zeit, um sich in einer sicheren und vertrauten Umgebung mit Luna Glass vertraut zu machen, bevor Sie sich in der Öffentlichkeit oder in unbekannten Umgebungen darauf verlassen.**

Elektrische Sicherheit und Aufladen

Luna Glass arbeitet mit elektrischen Komponenten, die empfindlich auf Feuchtigkeit und Staub reagieren. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Verwendung von Luna Glass:

 **Verwenden Sie stets das mitgelieferte Ladekabel.**

 **Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.**

 **Halten Sie Anschlüsse und Steckverbindungen sauber und frei von Staub oder Verschmutzungen.**

 **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt, lose oder gebrochen sind.**

 **Stellen Sie die Nutzung des Geräts ein, wenn Sie Anzeichen einer Fehlfunktion bemerken, wie z. B. ein flackerndes Display, nicht reagierende Bedienelemente oder ungewöhnliche Wärmeentwicklung, und wenden Sie sich an den Support.**

Akkusicherheit

Luna Glass enthält einen fest verbauten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der nicht vom Nutzer ausgetauscht werden kann.

 **Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 50 °C aus und lassen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht liegen.**

 **Öffnen, durchstechen oder zerdrücken Sie weder das Gerät noch den Akku und versuchen Sie nicht, Wartungs- oder Reparaturarbeiten daran durchzuführen.**

 **Falls der Akku ausläuft und Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Kontakt kommt, spülen Sie die betroffenen Stellen mit reichlich Wasser aus und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf.**

 **Stellen Sie die Nutzung des Geräts sofort ein, wenn es sehr heiß wird, Rauch oder Gerüche abgibt, sich aufbläht oder ausläuft. Legen Sie es an einem feuerfesten Ort ab und wenden Sie sich an den Support.**

Körperliches Unwohlsein

In seltenen Fällen kann die Verwendung von Luna Glass zu körperlichem Unwohlsein führen.

 **Stellen Sie die Nutzung von Luna Glass ein, wenn Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder Hautausschlag auftreten. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn die Symptome vollständig abgeklungen sind. Sollten die Symptome anhalten, wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal.**

 **Stellen Sie sicher, dass die Brille richtig sitzt und keinen übermäßigen Druck ausübt.**

 **Halten Sie die Kontaktflächen sauber und trocken. Das Gerät kann sich während des normalen Betriebs warm anfühlen. Wenn es ungewöhnlich heiß wird, schalten Sie es aus und wenden Sie sich an den Support. Das Gerät schaltet sich bei Temperaturen über 65 °C automatisch ab.**

Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören:

 **Überanstrengung der Augen oder Ermüdung**

 **Reisekrankheit**

 **Fehleinschätzungen von Entfernungen oder der räumlichen Orientierung**

 **Übelkeit**

Sichere Nutzung bei Aktivitäten

Verwenden Sie Luna Glass nur dann in Innenräumen oder im Freien, wenn dies sicher möglich ist. Verwenden Sie Luna Glass niemals in Situationen, in denen eine Fehlfunktion des Geräts zu schweren Verletzungen oder erheblichen Schäden führen könnte, beispielsweise bei:

 **dem Führen oder Bedienen jeglicher Fahrzeuge.**

 **dem Bedienen von Maschinen oder Elektrowerkzeugen.**

 **Aktivitäten, die ein hohes Maß an Koordination oder volle Aufmerksamkeit erfordern, einschließlich Laufen, Radfahren, Sport, Kochen, Schneiden mit scharfen Werkzeugen wie Messern oder Scheren sowie dem Umgang mit elektrisch betriebenen Geräten.**

 **Gehen oder Wechseln des Standorts während der Nutzung des Low-Light-Modus oder während der Konfiguration des Geräts.**