

Ulteriori indicazioni di sicurezza

Tenere a mente quanto segue durante l'utilizzo di Luna Glass.

- Luna Glass non sostituisce il bastone bianco, il bastone da segnalazione o il cane guida. Utilizzarlo insieme ad altri strumenti di assistenza in caso di necessità.
- Il dispositivo potrebbe ridurre la visione periferica, aumentando il rischio di inciampi, cadute o collisioni. Mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante e ruotare la testa per guardarsi intorno, non solo gli occhi.
- Prestare particolare attenzione quando si cammina, si usano le scale o si scende dai marciapiedi, poiché la percezione della profondità potrebbe essere alterata, aumentando il rischio di inciampi, cadute o collisioni.
- In presenza di forte rumore visivo (effetto neve), la visibilità potrebbe ridursi. Muoversi solo quando è possibile percepire chiaramente l'ambiente circostante. In caso di luce insufficiente, utilizzare una torcia per fornire luce affinché il dispositivo possa amplificarla.
- Completare la configurazione da fermi, quindi riorientarsi visivamente prima di muoversi.
- L'immagine visualizzata potrebbe non essere perfettamente allineata con il mondo reale a tutte le distanze, specialmente a distanza ravvicinata. Ciò può influire sulla coordinazione occhio-mano.
- Non utilizzare Luna Glass sotto la pioggia o la neve, non immergerlo e non utilizzarlo sott'acqua.

Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici

Tenere Luna Glass, i cavi e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici. I componenti di piccole dimensioni possono costituire un pericolo di soffocamento. I cavi possono costituire un pericolo di strangolamento.

Rischi residui

In rari casi, il dispositivo potrebbe smettere di visualizzare un'immagine corretta o potrebbe smettere di funzionare, ad esempio:

- La fotocamera smette di funzionare (nessuna immagine)
- L'immagine si blocca o diventa verde
- Il dispositivo si spegne in modo imprevisto
- Le cerniere si allentano o si rompono
- I terminali delle aste si sganciano durante la regolazione o l'uso

Se ciò accade, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo, spostarsi in un luogo sicuro e, se necessario, contattare l'assistenza.

Assistenza

Per assistenza o problemi di sicurezza:

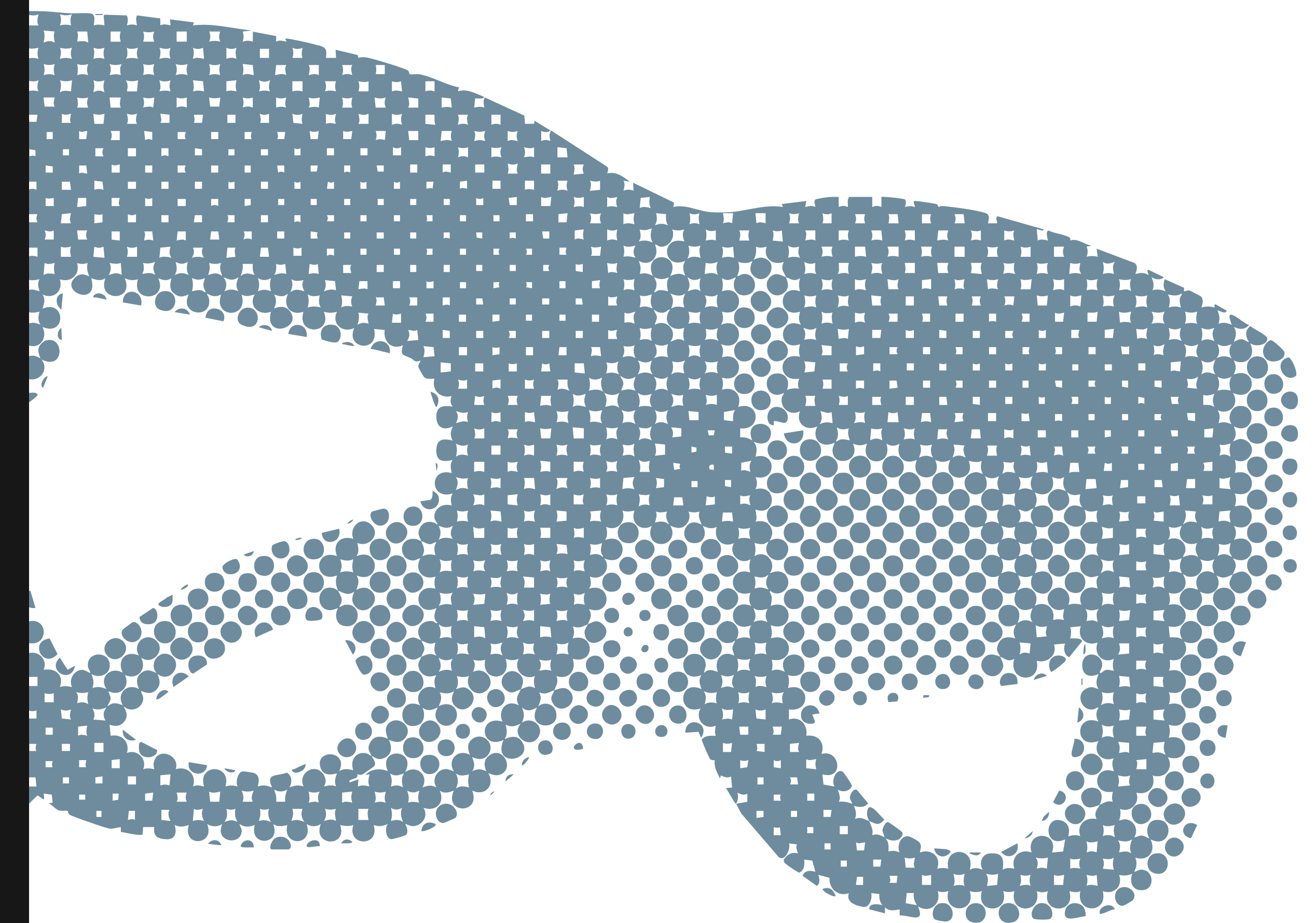
support@lunaglasses.nl

Pagina di assistenza: <https://www.seewithluna.com/support>

Aggiornamenti sulla sicurezza: <https://www.seewithluna.com/safety>

Sicurezza e avvertenze

Leggere attentamente il presente foglio delle avvertenze e consultare il manuale prima di utilizzare Luna Glass.



Luna.



 **NON TENTARE DI PIEGARE LE ASTE**

 **NON UTILIZZARE ALLA GUIDA**

Informazioni importanti sulla sicurezza

Luna Glass è destinato a supportare le persone che desiderano migliorare la propria visione in scenari con scarsa illuminazione durante le attività quotidiane, ottimizzando le scene in condizioni di scarsa illuminazione in tempo reale. Fornisce un'immagine più luminosa con colori e contrasto migliorati per aiutare gli utenti a individuare meglio oggetti, bordi e ostacoli. L'uso di Luna Glass non è raccomandato per le persone con sensibilità alla luce. Non è stato stabilito un limite massimo di utilizzo giornaliero. Gli utenti devono fare pause regolari e interrompere l'uso del dispositivo in caso di disagio, affaticamento o ridotta consapevolezza situazionale. Per un elenco completo di tutte le avvertenze di sicurezza, consultare il manuale del prodotto fornito con il dispositivo, che deve essere letto attentamente prima del primo utilizzo di Luna Glass.

- **Luna Glass è un dispositivo di assistenza fornito ai primi utilizzatori (early adopter). Non è un dispositivo medico, non diagnostica, tratta, cura o previene alcuna malattia o patologia e non è inteso per sostituire la visione naturale, le lenti correttive o le cure cliniche.**
- **Alcuni rischi, modalità di guasto e possibili effetti a lungo termine potrebbero non essere ancora noti. Utilizzando questo dispositivo, si prende atto che potrebbero verificarsi comportamenti imprevisti o malfunzionamenti.**
- **Maneggiare Luna Glass con cura. Trattandosi di un dispositivo di prima generazione per i primi utilizzatori (early adopter), contiene componenti ottici ed elettronici delicati che richiedono di essere maneggiati con cura per evitare graffi o danni.**
- **Si prega di dedicare del tempo per prendere confidenza con l'uso di Luna Glass in un ambiente sicuro e familiare prima di affidarsi a esso in ambienti pubblici o sconosciuti.**

Sicurezza elettrica e ricarica

Luna Glass funziona utilizzando componenti elettrici sensibili all'umidità e alla polvere. Tenere a mente quanto segue durante l'utilizzo di Luna Glass:

-  **Utilizzare sempre il cavo di ricarica in dotazione.**
 -  **Non utilizzare o caricare il dispositivo con le mani bagnate.**
 -  **Mantenere porte e connettori puliti e privi di polvere o detriti.**
 -  **Non utilizzare il dispositivo se una qualsiasi parte è danneggiata, allentata o rotta.**
- Interrompere l'uso del dispositivo se si notano segni di malfunzionamento come sfarfallio del display, comandi non reattivi o calore anomalo, e contattare l'assistenza.**

Sicurezza della batteria

Luna Glass contiene una batteria ricaricabile sigillata agli ioni di litio che non può essere sostituita dall'utente.

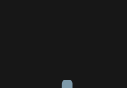
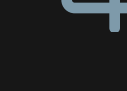
-  **Non esporre il dispositivo a temperature superiori a 50 °C o lasciarlo vicino a fonti di calore o alla luce solare diretta.**
 -  **Non aprire, perforare, schiacciare o tentare di riparare il dispositivo o la batteria.**
- Se la batteria perde e il liquido entra in contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.**
- Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo se diventa molto caldo, emette fumo o odori, si gonfia o perde. Posizionarlo in un'area ignifuga e contattare l'assistenza.**

Disagio personale

In alcuni rari casi, l'uso di Luna Glass potrebbe causare disagio personale.

-  **Interrompere l'uso di Luna Glass se si manifestano arrossamento, gonfiore, prurito o eruzione cutanea.**
 -  **Riprendere l'uso solo quando i sintomi sono scomparsi. Se i sintomi persistono, consultare un operatore sanitario.**
 -  **Assicurarsi che gli occhiali calzino correttamente e non applichino una pressione eccessiva.**
 -  **Mantenere le superfici di contatto pulite e asciutte.**
- Il dispositivo potrebbe risultare caldo durante il normale utilizzo. Se diventa insolitamente caldo, spegnerlo e contattare l'assistenza. Il dispositivo si spegne automaticamente al di sopra di 65 °C.**

I possibili effetti indesiderati possono includere:

-  **Affaticamento o stanchezza oculare**
-  **Chinetosi**
-  **Errori nella percezione della profondità o nella consapevolezza spaziale**
-  **Nausea**

Uso sicuro durante le attività

Utilizzare Luna Glass al chiuso e all'aperto solo quando è sicuro farlo. Non utilizzare mai Luna Glass in situazioni in cui un malfunzionamento del dispositivo potrebbe causare lesioni gravi, come ad esempio:

-  **Guidare o condurre qualsiasi veicolo.**
 -  **Azionare macchinari o utensili elettrici.**
- Attività che richiedono un'elevata coordinazione o la massima attenzione, tra cui correre, andare in bicicletta, praticare sport, cucinare, tagliare con strumenti affilati come coltelli e forbici, o maneggiare apparecchiature elettriche.**
- Camminare o spostarsi durante l'uso della modalità in caso di scarsa illuminazione, o durante la configurazione del dispositivo.**